


Appendix – Inner Storage with Web-Viewer

목적:

디텍터의 inner storage에 환자 촬영 오더를 업로드 하고, ZVIEW 대신 web viewer를 활용하여 촬영된 영상을 나중에 Zview로 넣을 수 있다.

사용 순서:

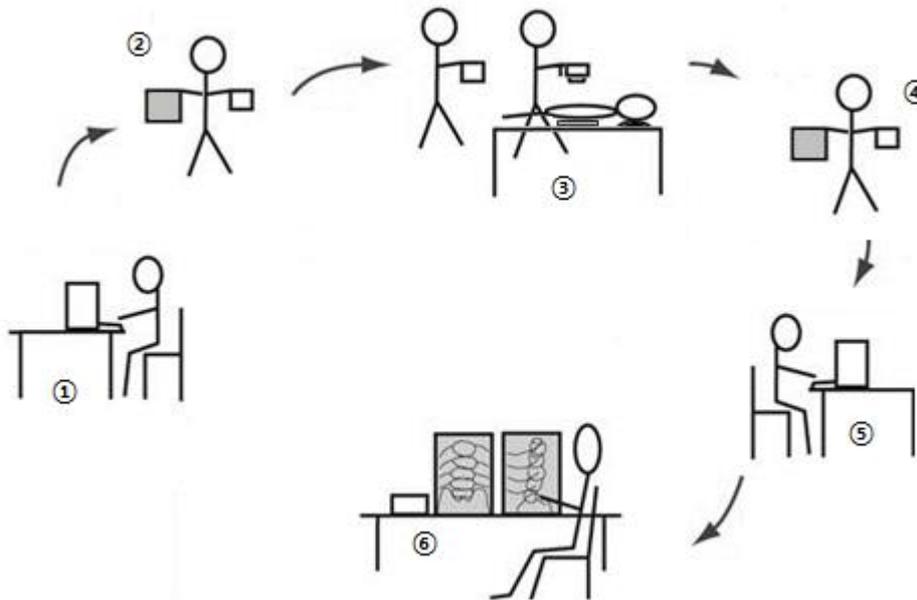


- ① 디텍터를 Zview에 연결하여 Zview의 오더를 디텍터에 업로드 시킨다.
- ② 디텍터와 태블릿(스마트폰)을 가지고 환자가 있는 장소로 이동한다.
- ③ 태블릿으로 영상을 확인하며 촬영한다.
- ④ 디텍터와 태블릿(스마트폰)을 가지고 Zview가 설치된 장소로 이동한다.
- ⑤ 디텍터를 Zview에 연결하여 영상을 다운로드 한 후 PACS같은 DICOM Storage로 전송한다.
- ⑥ PACS로 전송된 영상을 확인할 수 있다.

Zview 화면 설명:

1. 오더의 업로드

A. 업로드할 오더를 다중 선택 후 [List] 버튼을 클릭한다.

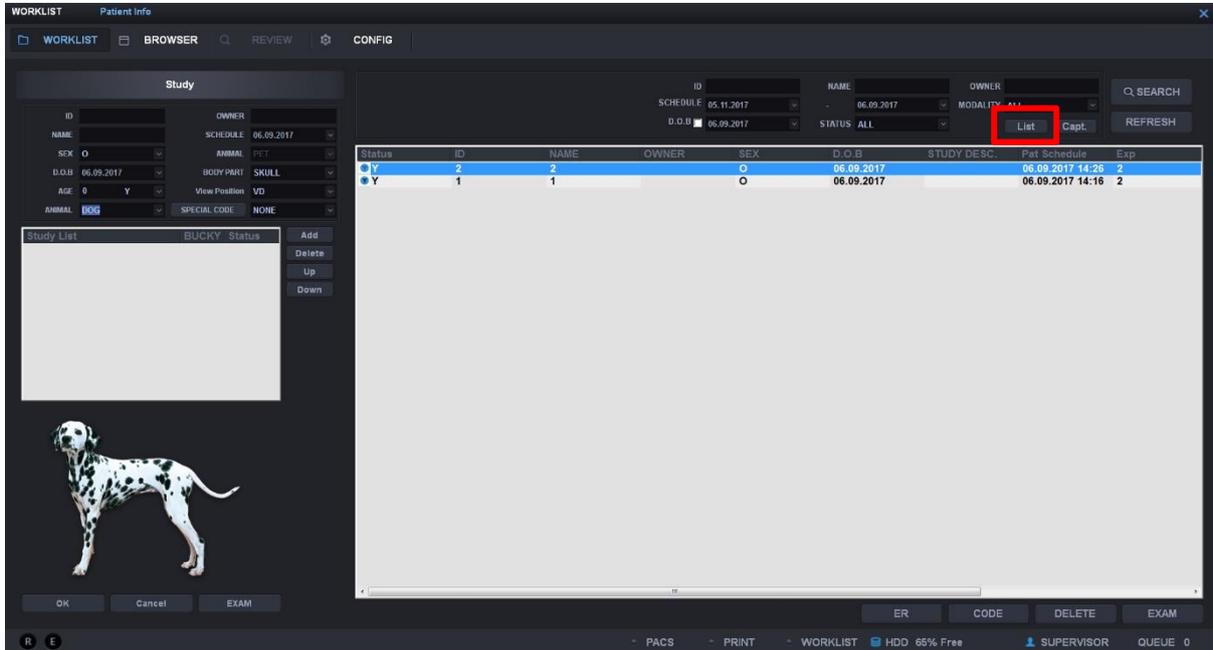


2. WebViewer로 촬영하기


A. 디렉터의 SSID로 접속 후 웹페이지 주소를 <http://192.168.120.1/> 입력.




B. [Go to Worklist] 클릭하여 오더 목록 화면으로 전환

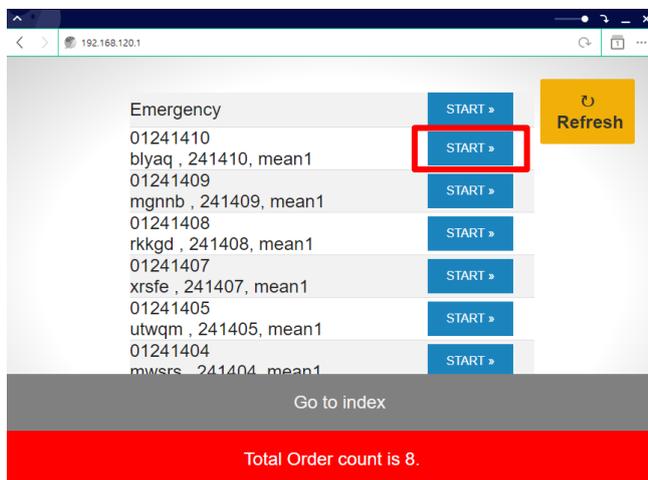


C. 촬영할 목록을 [START] 클릭하여 촬영 화면으로 전환

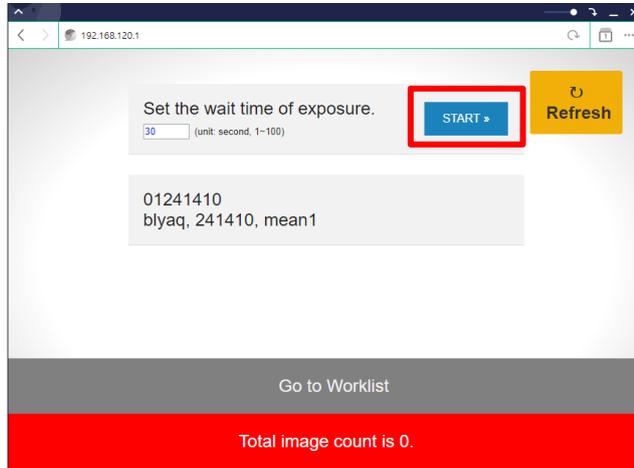

D. 촬영 시작을 위해 [START] 클릭하여 촬영 카운트 시작

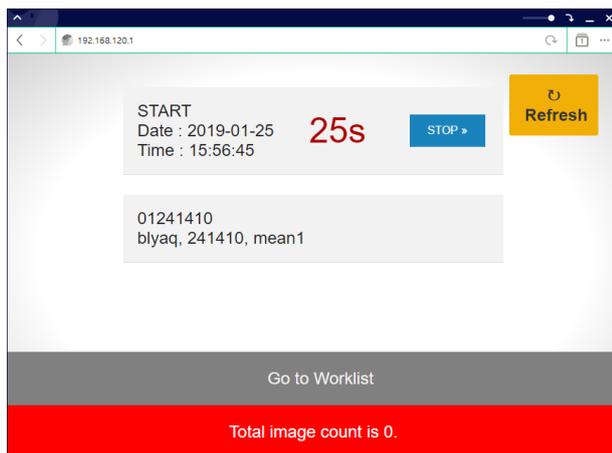


E. 촬영 카운트 후 촬영된 영상 확인

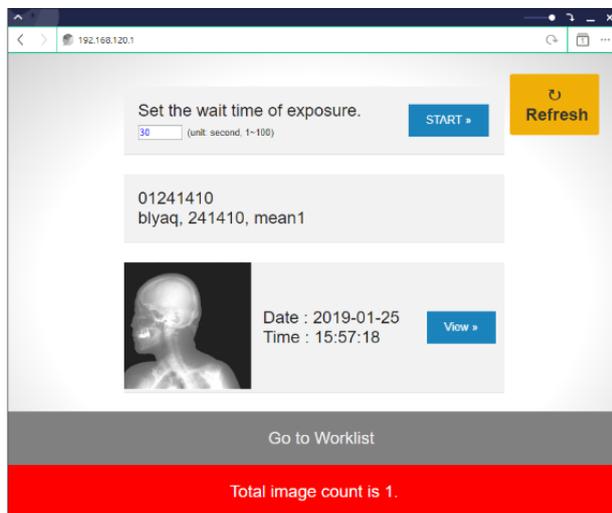


3. Zview로 가져오기

A. 스터디 선택 후 [Capt]버튼 클릭하여 촬영 모드로 전환

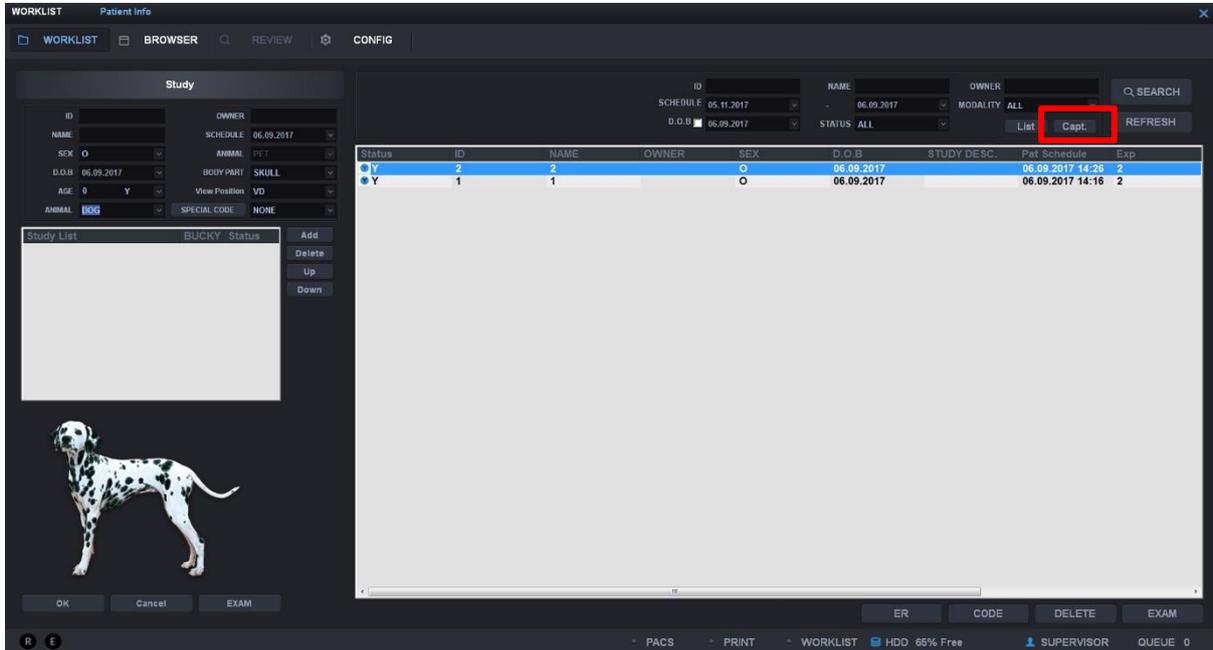

B. Capture 창이 뜬다.

- 촬영한 목록이 뜬다. (응급촬영 영상+ 해당 스터디 영상)
- 영상을 선택 후 [Capture]버튼을 클릭한다.

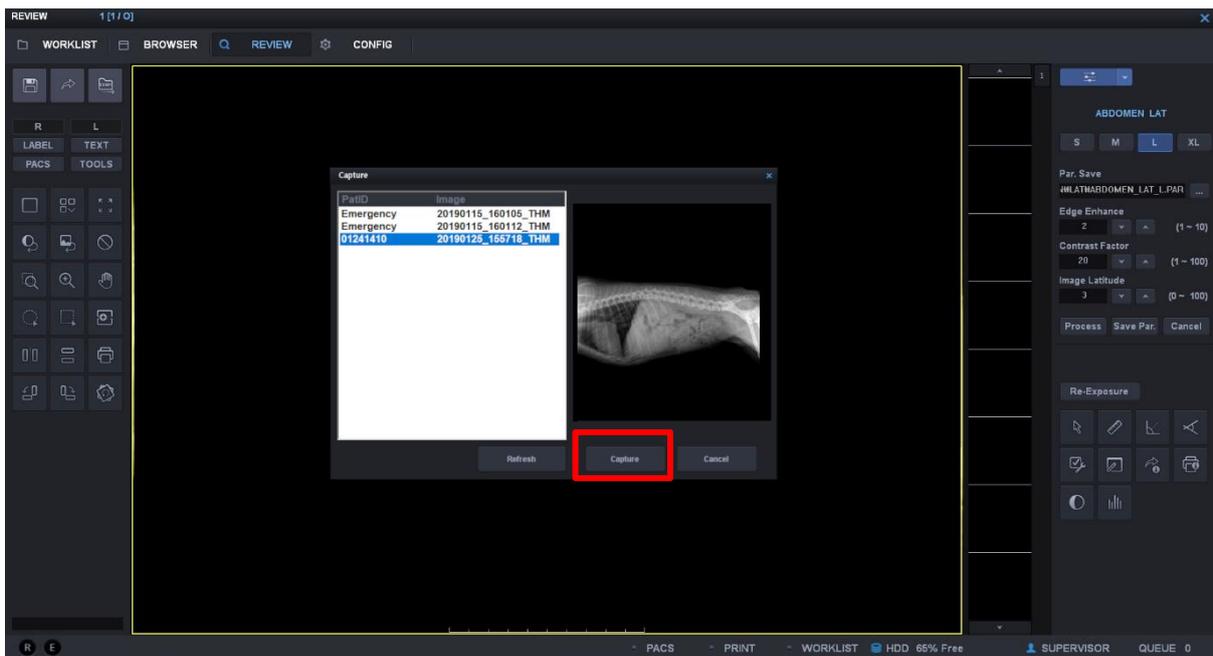

C. 위에서 선택한 영상이 화면에 뜨면, 저장 또는 저장 후 DICOM Storage로 전송한다.



만일 디렉터가 연결이 안되어 있다면 아래와 같은 메시지가 뜬다.

